


ALCOOL TESTER - TESTER DE ALCOOLEMIE DIGITAL LCD SI 4 MUSTIUCURI SUPLIMENTARE

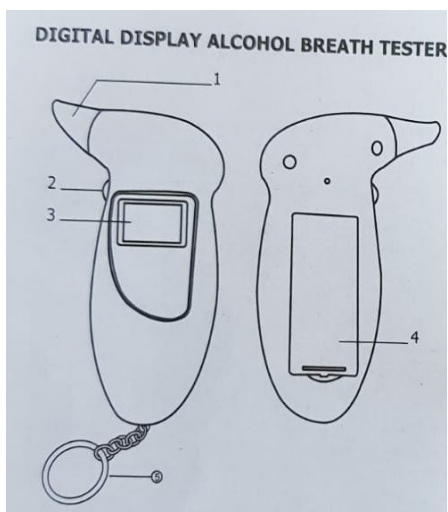

1. Inhalator (mustiuc)
2. Buton on/off
3. Ecran LCD
4. Indicator baterie
5. Breloc

Referinta:


BAC- Blood Alcohol Concentration

% BAC se refera la 0.05 g alcool in 100 ml de sange.

Specificatii:

1. Alcool tester digital;
2. Valori: 0.00-0.19 % BAC & 0.0- 1.9 g/l;
3. Raspuns rapid si revenire la statusul initial;
4. Oprire automata;
5. Utilizare bucala;
6. Breloc;
7. Functioneaza cu baterii alcaline, 2xAAA .


INSTALAREA BATERIILOR

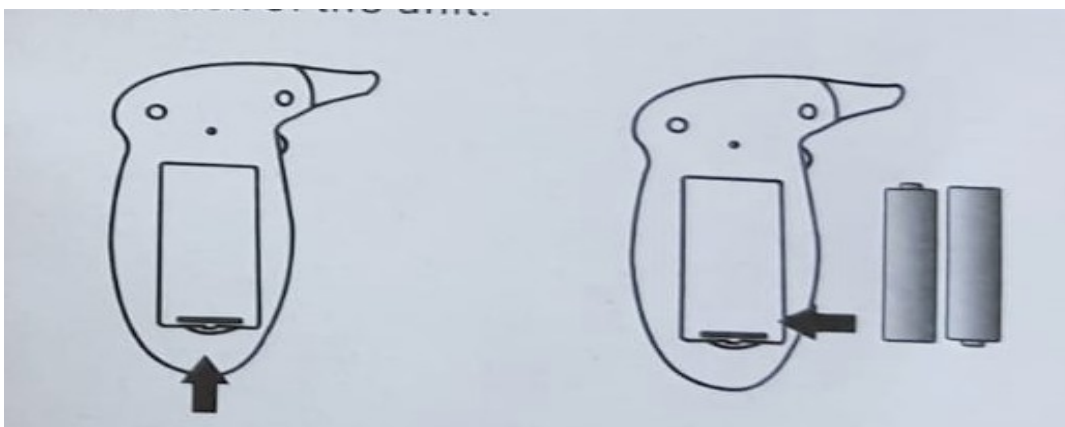

Deschideti compartimentul bateriilor situat pe partea dorsala a aparatului si introduceti bateriile respectand polaritatea.


Cum folositi alcool tester?

1. Apasati si tineti apasat butonul de pornire pentru o secunda pana cand auziti o alerta sonora.

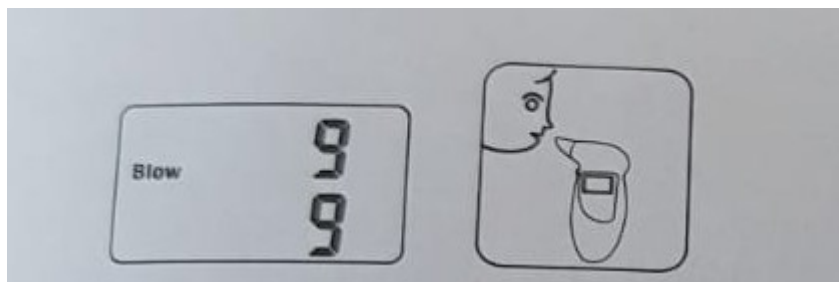

2 Simbolul “warm up” apare pe ecranul LCD si numaratoarea de la 10 la 0 incepe , indicand ca testerul este in modul de incalzire.

NOTA: Incalzirea poate dura mai mult in cazul in care testerul este pornit pentru prima data sau nu a fost folosit o perioada mai lunga de timp.

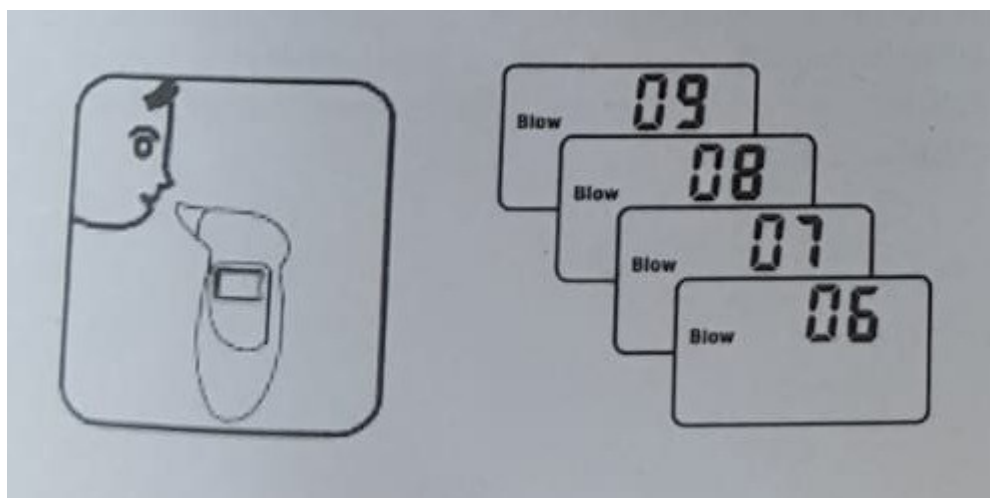

*Simbolul “Blow” - >“ Sufla” apare in momentul in care aparatul este pregatit de functionare si numaratoarea de la 10 la 0 a inceput, indicand ca aparatul este in modul masurare/testare.

*Trageti aer in piept si suflati in tester pentru 3 sau 5 secunde.

*Cititi rezultatul testului care apare pe ecranul LCD.

*Simbolul “ Caution” → Atentie apare daca pe ecran apare o concentratie ridicata de alcool
0.2 % BAC (0.2 g/l) la 0.05% BAC(sau 0.5 g/l)
0.3 0.05 % BAC (0.5 g/l) la 0.08 % BAC (sau 0.8g/l)




- Simbolul “ Danger” → “ Pericol” apare pe ecranul LCD precum si avertizare sonora, in momentul in care concentratia de alcool depaseste nivelul:
 > peste sau egal 0.05 % BAC (0.5 g/l)
 > peste sau egal 0.08 % BAC (0.8 g/l)
- Daca nu ati suflat cu suficienta putere, pe ecranul LCD va aparea “ 0.00% BAC & 0.0g/l “

Nota:

Pentru rezultate precise producatorul recomanda sa repetati testul de doua sau trei ori.

- Dupa afisarea rezultatului pe display-ul testerului pentru aproximativ 10 sec simbolul OFF poate fi vizibil pe ecran dupa care aparatul se inchide.

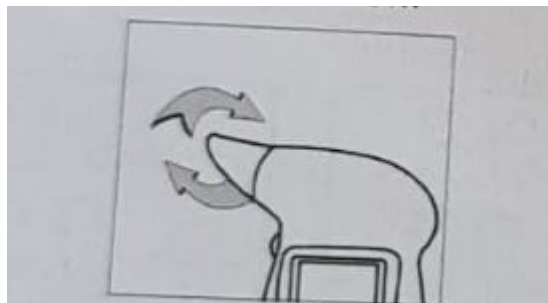

- Inlocuirea mustiucului se face prin rotirea acestuia in sensul acelor de ceasornic.
- Valori masurate: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9 g/l)
- Precizie $\pm 0.01\%$ BAC (0.1 g/l)
- Dimensiune tester 118x70x28 mm.

NOTA

- Se recomanda masurarea alcoolemiei doar dupa 20 de minute de la ingerarea alcoolului pentru ca acesta sa poata fi absorbit in sange
- Pentru precizia masurarii nu repetati testul mai repede de trei minute
- Nu mancati si nu beti cu 20 de minute inainte de testare
- Nu folositi chimicale sa curatati testerului